

EXACLEAR

Material de vinilpolisiloxano transparente

Tenga una visión clara



EXACLEAR de GC

Transparencia en su trabajo

EXACLEAR es un innovador material de silicona transparente que satisface las necesidades de casos estéticos exigentes y facilita la obtención de unos resultados fantásticos. Su absoluta transparencia lo hace especialmente eficaz en situaciones clínicas complejas.



Control visual de la inyección de composite.
* No son marcas registradas de GC



Visión cristalina

La **alta transparencia** ofrece un gran control visual y una fotopolimerización muy eficaz a través de la silicona.

Esto permite obtener una mayor tasa de conversión y evita la formación de una capa de inhibición de oxígeno, lo que **facilita el pulido final**.



La transparencia de EXACLEAR (extremo derecho) en comparación con los productos de la competencia.

Consistencia óptima para conseguir un procedimiento satisfactorio

Fluidez sin presión



Consistencia óptima para una **sencilla colocación en la cubeta**

Fluidez con presión



Fluido durante la inserción para una **perfecta adaptación a la preparación y una reproducción precisa de los detalles**

Fácil de perforar



Rígido y resistente después del fraguado, por lo que resulta fácil cortarlo y perforar los orificios para la inyección

No se desgarra



Suficientemente **flexible** para su extracción **sin roturas ni deformaciones**

Porque el tiempo también importa

Después de **solo 2 minutos** en el interior de la cavidad bucal, la impresión se fragua y se puede extraer.

Cuando se trabaja en un modelo, el fraguado del material se produce en menos de **7 minutos**.



2 minutos dentro de la cavidad bucal



7 minutos fuera de la cavidad bucal

Descubra la técnica para férula por inyección

Creación de carillas directas en la consulta

EXACLEAR, utilizado junto con un composite inyectable como G-ænial Universal Injectable, permite a los clínicos crear restauraciones tan estéticas como las carillas indirectas, pero de un modo más rápido, más asequible y utilizando **preparaciones menos invasivas**.

La transparencia de EXACLEAR permite comprobar hasta **el más mínimo detalle** y evita la formación de una capa inhibidora de oxígeno, facilitando así el pulido final. **G-ænial Universal Injectable** es un producto muy adecuado para esta técnica debido a su tixotropía, resistencia y brillo.



1. Situación inicial



2. Llene la cubeta de impresión con EXACLEAR y tome una impresión de la cera en el modelo.



3. Después del fraguado, retire la silicona transparente de la cubeta.



4. Perfore un orificio a través de la llave de silicona para crear el espacio necesario para la punta de composite.



5. Aísle los dientes circundantes, grabe el esmalte y aplique un agente adhesivo.



6. Coloque la llave de silicona en la boca e inyecte G-ænial Universal a través del orificio de la llave.



7. Fotopolimerice a través de la llave de silicona y, a continuación, retírela.



8. Elimine el composite sobrante con una cuchilla.



9. Resultado final después de algunos pasos de pulido.

Cortesía del Dr. A. Salehi (Francia)

Tratamiento en consulta de desgaste generalizado con composites directos

La técnica para férula por inyección también es ideal para tratar casos de desgaste o para recrear morfologías complejas. La transparencia de EXACLEAR ayuda a ver y controlar la inyección mientras se tratan varios dientes de forma simultánea. La alta resistencia a la flexión y a la abrasión de **G-ænial Universal Injectable** resulta ideal para estos casos de posteriores.



1. Situación inicial



2. Llene la cubeta de impresión con EXACLEAR y tome una impresión de la cera en el modelo.



3. Situación después del tratamiento con la técnica para férula por inyección.

Cortesía del Dr. A. Mak (Australia)

EXACLEAR

Información para pedidos



EXACLEAR

10001483	EXACLEAR, 2x 51g cartridges
10003262	Mixing tips Type II L (60)

Sus socios en situaciones clínicas complejas

Técnica para férula por inyección

Control sencillo de la inyección con EXACLEAR



G-aenial Universal Injectable

Composite inyectable de alta resistencia y tixotropía perfecta

Técnica de estratificación

Fotopolimerización palatina sencilla con EXACLEAR



Essentia

Composite altamente estético con un sistema de colores simplificado

Colocación de retenedores de fibra ortodóntica

Fotopolimerización eficaz del adhesivo y fibras con EXACLEAR



everStickORTHO

Refuerzo de fibra de vidrio para retenedores ortodónticos estéticos

Trabajos provisionales de coronas y puentes

Fotopolimerización perfecta del material de coronas y puentes con EXACLEAR



TEMPSMART DC

Material provisional de polimerización dual para coronas y puentes

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark,
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32 16 74 10 00
Fax. +32 16 40 48 32
info.gce@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe>

GC IBÉRICA

Dental Products, S.L.
Edificio Codesa 2
Playa de las Américas 2, 1º, Of. 4
ES-28290 Las Rozas, Madrid
Tel. +34.916.364.340
Fax. +34.916.364.341
comercial.spain@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe/es-ES>