

MEDESY

Elevador Flohr Derecho 3.0 mm

INFORMACIÓN GENERAL

Marca	MEDESY
Material	Acero inoxidable
Longitud	155 mm
Ancho punta	3.0 mm
Posición	Derecho
Esterilización	Autoclave
Familia	Producto de múltiples variantes — ver tabla de variantes
N° Variantes	2

VARIANTES DISPONIBLES (2)

SKU	Descripción	Posición
MEDESY/690 /4	Elevador Flohr Derecho 3.0 mm	Derecho
MEDESY/690 /3	Elevador Flohr Izquierdo 3.0 mm	Izquierdo

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Elevador Flohr 3.0 mm derecho MEDESY para luxación de raíces de calibre estándar. Diseño Flohr con punta cónica de 3.0 mm y angulación hacia la derecha.

INDICACIONES CLÍNICAS

- Luxación de raíces residuales en sector posterior derecho
- Uso con par izquierdo (MEDE690/3)

VENTAJAS CLÍNICAS

- Diseño Flohr — control lateral de fuerza

- Par derecho + izquierdo para cobertura bilateral

PRECAUCIONES DE USO

- De uso exclusivo del profesional odontológico.
- Esterilizar antes de cada uso — autoclave 134°C / 18 min.
- Inspeccionar antes de cada uso — retirar si hay deformación.
- No usar como palanca ósea salvo indicación específica del instrumento.

ESTERILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO

- Autoclave vapor a presión: 134°C / 18 minutos.
- Detergente enzimático + ultrasonido antes de cada ciclo.
- Lubricar articulaciones con aceite de silicona cada 3-5 ciclos.
- Guardar en cassette de esterilización MEDESY o bandeja cerrada.