

MEDESY

Elevador Hylim Izquierdo 3.0 mm

INFORMACIÓN GENERAL

Marca	MEDESY
Material	Acero inoxidable
Longitud	160 mm
Ancho punta	3.0 mm
Posición	Izquierdo
Diseño	Hylim — angulado fino
Esterilización	Autoclave
Familia	Producto de múltiples variantes — ver tabla de variantes
N° Variantes	2

VARIANTES DISPONIBLES (2)

SKU	Descripción	Posición
MEDESY/795 /3	Elevador Hylim Izquierdo 3.0 mm	Izquierdo
MEDESY/795 /4	Elevador Hylim Derecho 3.0 mm	Derecho

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Elevador Hylim Izquierdo 3.0 mm MEDESY es un elevador de perfil fino angulado para luxación de raíces delgadas. Su diseño Hylim permite acceso en espacios interradiculares estrechos con dirección izquierda.

INDICACIONES CLÍNICAS

- Raíces delgadas en espacios interradiculares estrechos
- Uso con par derecho MEDE795/4

VENTAJAS CLÍNICAS

- Perfil fino Hylim — acceso sin trauma en raíces delgadas
- Par D+I cobertura bilateral

PRECAUCIONES DE USO

- De uso exclusivo del profesional odontológico.
- Esterilizar antes de cada uso — autoclave 134°C / 18 min.
- Inspeccionar antes de cada uso — retirar si hay deformación.
- No usar como palanca ósea salvo indicación específica del instrumento.

ESTERILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO

- Autoclave vapor a presión: 134°C / 18 minutos.
- Detergente enzimático + ultrasonido antes de cada ciclo.
- Lubricar articulaciones con aceite de silicona cada 3-5 ciclos.
- Guardar en cassette de esterilización MEDESY o bandeja cerrada.